



# Phago'wipes DASR

Lingettes imprégnées d'une solution  
désinfectante hydro-alcoolique  
pour les surfaces



## Points forts

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Large spectre désinfectant
- ✓ Formule ecocertifiée
- ✓ Produit « contact alimentaire » sans rinçage

## Conditionnements

Présentation	Code	Nombre d'unité par carton
Boite de 200 lingettes	460371D	10





# Phago'wipes DASR

## Domaine d'utilisation

- ✓ Les **Phago'wipes DASR** peuvent être utilisées pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade.
- ✓ Les **Phago'wipes DASR** peuvent être utilisées, sans rinçage sur les surfaces pouvant se trouver en contact direct avec les denrées alimentaires (table, plan de travail, plateaux, chariot de repas, trancieurs, hachoirs, couteaux...)
- ✓ Les **Phago'wipes DASR** peuvent être également utilisées sur les jouets pour une désinfection complète.
- ✓ Les **Phago'wipes DASR** ne laissent pas de traces sur les surfaces.

## Composition

- ✓ Actif désinfectant:
  - Ethanol (N° CAS : 64-17-5) : 52,70% m/m
- ✓ Contient aussi : Eau, correcteur d'acidité
- ✓ 99,90% du total des ingrédients sont d'origine naturelle

TP2 – Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

TP 4 – Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

## Caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques

- ✓ Couleur des lingettes: bleues
- ✓ Odeur : alcool
- ✓ pH à 20°C (produit pur) : 5 à 7
- ✓ Point éclair : 23°C

## Mode d'emploi

- ✓ Les **Phago'wipes DASR** sont prêtes à l'emploi.
- ✓ Appliquer sur la surface à désinfecter. Ne pas rincer.
- ✓ Laisser agir 5 minutes pour une activité bactéricide et virucide; 15 minutes pour une activité fongicide.

## Compatibilité

- ✓ Faire un essai au préalable sur plexiglass.

## Précautions d'emploi

- ✓ Produit réservé à un usage professionnel
- ✓ Péréemption : 3 ans à partir de la date de fabrication.
- ✓ La fiche de données de sécurité est disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

*Utiliser les biocides avec précaution.*

*Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.*

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*



Laboratoire  
**phagogène**<sup>®</sup>

Christeyns France – Division Santé  
31, rue de la Maladrie - 44120 VERTOU - France  
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73  
[www.phagogene.fr](http://www.phagogene.fr)



# Phago'wipes DASR

## Activité antimicrobienne

Normes	Concentration	Temps
<b><u>BACTERICIDE</u></b>		
<b>EN 1040</b> ( <i>P. aeruginosa</i> et <i>S. aureus</i> )	100 %	5 min.
<b>EN 1276</b> ( <i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. typhimurium</i> et <i>L. monocytogenes</i> )	100 %	5 min.
<b>EN 13727+A2</b> ( <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> )	80%	5 min.
<b>EN 13697</b> ( <i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. typhimurium</i> et <i>L. monocytogenes</i> )	100 %	5 min.
<b>EN 16615</b> ( <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> )	100 %	5 min.
<b><u>FONGICIDE</u></b>		
<b>EN 1275</b> ( <i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i> )	100 %	15 min.
<b>EN 1650</b> ( <i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i> )	100 %	15 min.
<b>EN 13624</b> ( <i>C. albicans</i> )	80%	15 min.
<b>EN 13624</b> ( <i>A. brasiliensis</i> )	97%	15 min.
<b>EN 13697</b> ( <i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i> )	100 %	15 min.
<b>EN 16615</b> ( <i>C. albicans</i> )	100 %	5 min.
<b><u>VIRUCIDE</u></b>		
BVDV et Vaccinia virus	100 %	5 min.
Actif sur HBV, HCV, HIV, Herpes virus, Coronavirus (inclus VRS), Influenza A/H5N1 et Influenza A/H1N1	100 %	5 min.

Utiliser les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

